

Làmina cortical rígida

OsteoBiol®
by Technos

Característiques i manipulació

CARACTERÍSTIQUES

Està constituïda per os cortical porcí amb un mètode exclusiu de Tecnos®.

UTILITZACIÓ

La Làmina rígida té una consistència totalment rígida, es pot tallar fins aconseguir la mida desitjada i no cal que s'hidrati prèviament. Aquesta membrana està dissenyada per a la realització de la Tècnica de Khoury mitjançant la fixació amb cargols de osteosíntesi.



Làmina rígida

Tejido de origen
Hueso cortical

Colágeno tisular
Preservado

Forma física
Lámina desecada rígida

Composición
100% hueso cortical

Espesor
1.0 mm aprox.

Tiempos de regeneración estimados
De 4-8 meses para conseguir una nueva cresta.

Envases
35x35 mm

Códigos del producto
LS35LS | 1 Lámina rígida | 35x35 mm | Porcino

**Dissenyada específicament per a la
tècnica d'encofrat**

Os cortical heteròleg col·lagenat

Làmina cortical rígida

OsteoBiol®
by Technos

Indicacions clíniques

Encara que l'empelt d'os xenogènic proporciona suport estructural al defecte ossi, aquesta làmina no està indicada per a la seva utilització en situacions de suport de càrrega, a no ser que s'utilitzi en combinació amb una apropiada fixació d'osteosíntesi. La Làmina rígida ha estat dissenyada per la reconstrucció del sòl orbital i per a la reconstrucció de la paret després d'un trauma.

Una de les indicacions clíniques per a la que està recomanada és la tècnica de encofrat, documentada pel Prof. Khoury, ha suposat una revolució en el camp de la regeneració òssia. Pot cobrir-se amb membranes Derma X-Fina, Evolution X-Fina o Duo Teck felt per assegurar major cobertura tissular.



TÈCNICA DE ENCOFRADO