

SISTEMES DE DESINFECCIÓ PER CLÍNICA DENTAL



Desinfectant Per Sistemes d'Aspiració

INSTRUCCIONS D'ÚS

Dispensar 20ml diaris dissolts en 980 ml d'aigua tèbia. Aspirar per totes les mànegues d'aspiració, deixar actuar per 15 minuts i esbandir amb aigua.

COMPOSICIÓ DEL PRODUCTE

Dimethyldioctylammonium chloride, Dipropylene glycol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, Ethanol, Citric acid, Non- ionic surfactant, Antifoam, Dye.

PROVES ESTÀNDARD

EN 14885, EN 14476, EN 14348,
EN 13727, EN 13697, EN 13624.

ESPECTRE D'ACCIÓ I TEMPS DE CONTACTE

Bactericida	15 min	Tuberculicida & Micobactericida	60 min
Pseudomonas aeruginosa	15 min	Mycobacterium terrae	60 min
Enterococcus hirae	15 min		
Staphylococcus aureus	15 min	Virucida	
Salmonella typhimurium	15 min	Hepatitis C virus (HCV)	15 min
Legionella pneumophila	15 min	Human Immunodeficiency Virus (HIV)	15 min
E-Coli	15 min		
Levuricida	15 min	Fungicida	30 min
Candida albicans	15 min	Aspergillus brasiliensis	30 min

- PER LA CURA DIARIA DELS SISTEMES D'ASPIRACIÓ
- FÒRMULA ALCALINA DE PODEROSA ACCIÓ ANTIRESIDUS
- TEMPS DE CONTACTE RÀPID - 15 MINUTS
- PER SISTEMES SECS, HUMITS i SEMI HUMITS