

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN PARA CLÍNICA DENTAL



Ref: ELA1000

Desinfectante Para Sistemas De Aspiración

INSTRUCCIONES DE USO

Dispensar 20ml diarios disueltos en 980 ml de agua tibia. Aspirar por todas las mangueras de aspiración y dejar actuar por 15 minutos y enjuagar con agua.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Dimethyldioctylammonium chloride, Dipropylene glycol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, Ethanol, Citric acid, Non- ionic surfactant, Antifoam, Dye.

PRUEBAS ESTÁNDARES

EN 14885, EN 14476, EN 14348,
EN 13727, EN 13697, EN 13624.

ESPECTRO DE ACCIÓN Y TIEMPO DE CONTACTO

Bactericida	15 min	Tuberculicida & Micobactericida	60 min
Pseudomonas aeruginosa	15 min	Mycobacterium terrae	60 min
Enterococcus hirae	15 min		
Staphylococcus aureus	15 min	Virucida	
Salmonella typhimurium	15 min	Hepatitis C virus (HCV)	15 min
Legionella pneumophila	15 min	Human Immunodeficiency Virus (HIV)	15 min
E-Coli	15 min		
		Fungicida	30 min
Levuricida	15 min	Aspergillus brasiliensis	30 min
Candida albicans	15 min		

- PARA EL CUIDADO DIARIO DE LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN.
- FÓRMULA ALCALINA DE PODEROSA ACCIÓN ANTIRESIDUOS.
- TIEMPO DE CONTACTO RÁPIDO - 15 MINUTOS.
- PARA SISTEMAS SECOS, HÚMEDOS Y SEMI HÚMEDOS.