

SISTEMES DE DESINFECCIÓ PER CLÍNICA DENTAL



Ref: ELI1000

Desinfectant Per Instruments

INSTRUCCIONS D'ÚS

Afegir 20 ml en 1 Litre d'aigua (solució al 2%), temps d'immersió 15 minuts. no excedir-se en el temps d'immersió. una vegada desinfectat, esbandir els instruments.

COMPOSICIÓ DEL PRODUCTE

Aqua, Benzalkonium chloride, Didecyldimethylammonium chloride, Propan-2-ol, Benzotriazole, Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride, Hydroxyethylcellulose, Cocamidopropyl betaine, Parfum, C.I. 44045.

PROVES ESTÀNDARD

EN 14885, EN 14562, EN 14561,
EN 14476, EN 13727, EN 13624.

ESPECTRE D'ACCIÓ I TEMPS DE CONTACTE

Bactericida	15 min	Levuricida	15 min
Pseudomonas aeruginosa	15 min	Candida albicans	15 min
Staphylococcus aureus	15 min	Virucida	
Enterococcus hirae	15 min	HIV 1	5 min
Salmonella typhimurium	5 min	Human influenza B virus	2 min
Legionella pneumophila	5 min	Hepatitis C virus (HCV)	5 min

- TEMPS DE CONTACTE RÀPID I AMPLI ESPECTRE D'ACCIÓ.
- DOSIFICACIÓ ECONÒMICA DE SOLS AL 2%.
- CONTÉ INHIBIDORS ANTICORROSIÓ.
- TESTAT SEGONS EN21530 PER CERTIFICAR COMPATIBILITAT.