

Papacàrie Duo



La solució ideal
per retirar les càries
de manera natural



- Sense necessitat d'utilitzar rotatoris
- Sense necessitat d'utilitzar anestèsia(*)



* Hi han excepcions: on les càries estan molt a prop del nervi o que no hi hagi un accés directe

Descripció del producte: Gel de Papaïna per retirar la càries.

Como s'utilitza? Una gota de Papacàrie col·locada sobre la càries, estova la lesió en tant sols 30 segons i permet desenganxar-la de la dentina sana sense necessitat d'utilitzar la turbina.

PAPACÀRIE DUO sols actua sobre la càries, deixant intacta la dentina sana.



CARACTERÍSTIQUES

- * **VERSATIL:** Apte per qualsevol tipus de pacient, de totes les edats i condicions.
- * **NATURAL:** No presenta contraindicacions.
- * **RÀPID:** Menor temps d'operatòria de 30 "a 60" segons en cada aplicació.
- * **SEGUR:** No genera aerosols (evita contagis Covid-19).
- * **RESPECTUÓS:** Mètode mínimament invasiu. No es requereix utilització de la turbina en 80% casos.
- * **SENSE DOLOR:** No precisa d'anestèsia en la majoria de casos.

COMPOSICIÓ PAPACÀRIE

PAPAÏNA: Una endo proteïna de la família de les cisteïnes proteolítiques. Se li atribueixen propietats bacteriològiques, bacteriostàtiques i antiinflamatòries.

CLORAMINA: Compost de clor i Amoni és bactericida i desinfectant, ajuda a estovar la dentina cariada.

BLAU DE TOLUIDINA: fotosensibilitzador no tòxic. Potència l'acció antimicrobiana dels altres components.

PVP ~~108,00~~ € oferta 90,00 €+ IVA

(cost aprox. 3 €/càries)

Duració aproximada: fins a 30 aplicacions

EXPERIÈNCIA I TRAJECTORIA DEL PRODUCTE

- Papacàrie Duo és un producte amb una gran trajectòria a Amèrica (creat el 2003)
- Des de la seva creació ha obtingut un gran suport científic amb més de 300 estudis publicats.
- Recentment ha obtingut els permisos per a la seva distribució a Europa.

CAS CLÍNIC - DR. GAVIÑO

Pacient de 48 anys d'edat amb càries extensa en peça 4.7.

Amb l'ús del Papacàrie Duo el pacient no requereix anestèsia



Cas clínic en una nena

Pacient de 6 anys amb càries a la peça 5.2 sense dolor ni alteració radiogràfica. Es decideix fer remoció químic-mecànica utilitzant Papacàrie Duo sense anestèsia i amb aïllament relatiu, després de 30 segons de la seva aplicació, retirem tota la càries amb moviments pendulars. Es finalitza el tractament amb una reconstrucció estètica amb composite. Realitzo revisió de la pacient passat un mes sense presència de molèstia ni alteració radiogràfica.

CAS CLÍNIC - DR. KARIM



Protocol d'ús Papacàrie Duo



1. Realitzar una radiografia diagnòstica periapical o interproximal.
2. Netejar la zona a tractar amb aigua.
3. Aïllament relatiu amb tampons de cotó i aspiració.
4. Posar el gel en un got Dappen o en el guant i portar-lo a la cavitat amb la cureta.
5. Aplicar el gel i esperar que la càries s'estovi (de 30 a 60 segons).
6. Raspar la dentina cariada mitjançant moviments pendulars d'escombrat amb cureta roma.
7. Reaplicar el gel sempre que sigui necessari fins a l'eliminació completa de el teixit corcats.
8. Inspecció de la textura restant de la dentina.
9. Neteja de la cavitat amb aigua.
10. Restauració segons procediment habitual.
11. Realitzar radiografia de comprovació.

