

TEST D'ANTICOSSOS COVID 19/ IgG / IgM



- Test ràpid anticossos Covid 19
- Material de mostra: sang humana, mostres de sèrum i plasma
- Resultats disponibles: en 10 minuts.
- Capacitat per detectar contagis (Sensibilitat diagnòstica): 94,1%
- Capacitat per detectar casos negatius (Especificitat de diagnòstic): > 99,2%.
- Emmagatzematge a temperatura ambient
- Per a ús exclusiu dels professionals de la salut
- Fabricació europea amb certificació ISO
- Caixa amb 25 proves ràpides.

Contingut d'una caixa:

- 25 tests en casset Covid 19 IgG / IgM
- 25 pipetes sol ús
- 1 memòria intermèdia (3 ml)
- 1 manual instruccions (en castellà)


Fàcil d'usar i interpretar:

Es mostren resultats igual que en un test d'embaràs.




Instruccions d'ús:

1. Tregui el casset del test del seu envàs d'alumini i utilitzi'l com més aviat millor. Els millors resultats s'obtinran si el test es realitza immediatament després d'obrir l'envàs. Etiqueti el casset de test amb la identificació del pacient.
2. Col·loqui el casset de test sobre una superfície plana i neta.
3. Subjectant la pipeta verticalment, reculli la mostra (Sang completa / sèrum / plasma) fins al primer eixamplament (aprox. 10 ml) i afegeixi'l al pouet de mostra (S) del casset de test. (Fig.1)
4. Sostenint el pot del búfer verticalment, afegeixi 2 gotes (aprox. 80 µl) del búfer al pouet. Eviti la formació de bombolles d'aire. (Fig.2)
5. Activi el cronòmetre (10 minuts). (Fig.3).
6. Esperí que aparegui (n) les (s) línies (s) acolorida (s). Llegeixi els resultats del test als 10 minuts. No interpreti els resultats després de més de 20 minuts.

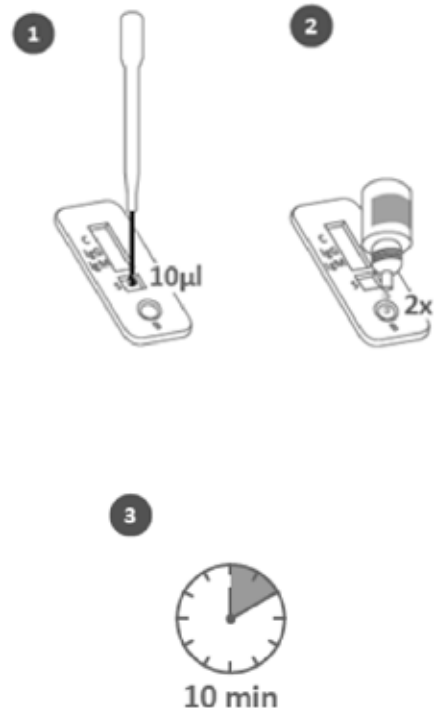

Interpretació dels resultats

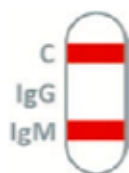

Positiu per IgM:
Apareix una línia acolorida en la regió de control "C" i una altra línia acolorida en la regió de test "IgM". El resultat és indicatiu d'una infecció primària per SARS-CoV-2.



Positiu per IgG:
Apareix una línia acolorida en la regió de control "C" i una altra línia acolorida en la regió de test "IgG". El resultat és indicatiu d'una possible infecció secundària per SARS-CoV-2.



Positiu per IgG i IgM:
A més de la línia de control "C", es desenvolupa una línia acolorida en la regió de test "IgG". El resultat és indicatiu d'una possible infecció secundària per SARS-CoV2.



Negatiu:
apareix una línia acolorida a la regió de control "C". no desenvolupen línies a la regió de test "IgM" i "IgG".



No vàlid:
No apareix la línia de control "C". els resultats s'han de descartar. Si això succeeix revisi el procediment i repeteixi el test.