

## TEST DE ANTICUERPOS COVID 19/ IgG / IgM



- Test rápido anticuerpos Covid 19
- Material de muestra: sangre humana, muestras de suero y plasma
- Resultados disponibles: en 10 minutos.
- Capacidad para detectar contagios (sensibilidad diagnóstica): 94,1 %
- Capacidad para detectar casos negativos (Especificidad de diagnóstico): >99,2 %.
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Para uso exclusivo de los profesionales de la salud
- Fabricación europea con certificación ISO
- Caja con 25 pruebas rápidas.

### Contenido de una caja:

- 25 tests en casete Covid 19 IgG/IgM
- 25 pipetas desechables
- 1 búfer (3 ml)
- 1 manual instrucciones (en castellano)


### Fácil de usar e interpretar:

Se muestran resultados igual que en un test de embarazo.




## Instrucciones de Uso:

1. Retire el casete del test de su envase de aluminio y utilícelo lo antes posible. Los mejores resultados se obtendrán si el test se realiza inmediatamente después de abrir el envase. Etiquete el casete de test con la identificación del paciente.
2. Coloque el casete de test sobre una superficie plana y limpia.
3. Sujutando la pipeta verticalmente, recolecte la muestra (sangre completa/suero/plasma) hasta el primer ensanchamiento (aprox. 10 µL) y añádala al pocillo de muestra (S) del casete de test. (fig.1)
4. Sosteniendo el bote de búfer verticalmente, añada 2 gotas (aprox. 80 µL) del búfer al pocillo del búfer. Evite la formación de burbujas del aire. (fig.2)
5. Active el cronómetro (10 minutos). (fig.3).
6. Espere a que aparezca(n) las(s) líneas(s) coloreada(s). Lea los resultados del test a los 10 minutos. No interprete los resultados después de más de 20 minutos.

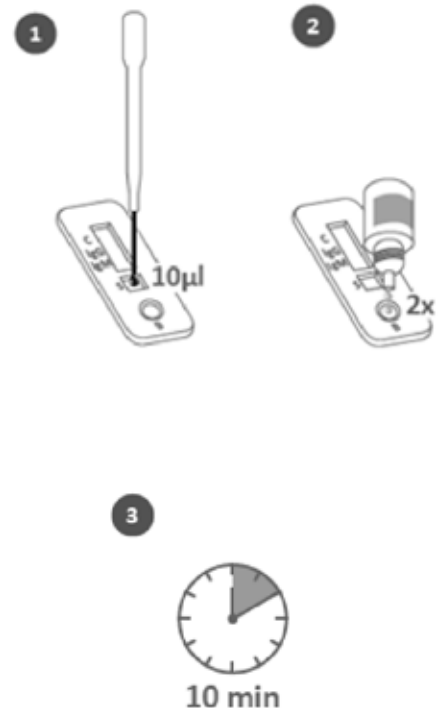


## Interpretación de los resultados

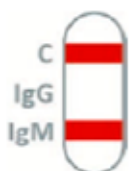

### Positivo para IgM:

Aparece una línea coloreada en la región de control "C" y otra línea coloreada en la región de test "IgM"

El resultado es indicativo de una infección primaria por SARS-Cov-2.

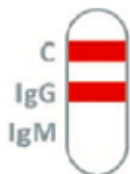

### Positivo para IgG:

Aparece una línea coloreada en la región de control "C" y otra línea coloreada en la región de test "IgG".

El resultado es indicativo de una posible infección secundaria por SARS-CoV-2



### Positivo para IgG e IgM:

Además de la línea de control "C", se desarrolla una línea coloreada en la región de test "IgG".

El resultado es indicativo de una posible infección secundaria por SARS-CoV2



### Negativo:

Aparece una línea coloreada en la región de control "C". No se desarrollan líneas en la región de test "IgM" e "IgG"



### No válido:

No aparece la línea de control "C". Los resultados se deben descartar. Si esto sucede revise el procedimiento y repita el test