


CHINCHETAS REABSORBIBLES

- **Diseño:** Las chinchetas biodegradables Inion Tack están diseñadas para usarse con la membrana biodegradable y para sujetar la membrana en su posición.
- **Aplicaciones:** Su uso con membrana biodegradable está indicado para los tratamientos quirúrgicos (por ejemplo, defectos de furca de clase II, defectos intraóseos y defectos de tipo recesión), para cirugía pre-implantaria y peri-implantaria y para cubrir defectos óseos y espacio vacíos.
- **Composición:** Están compuestas de copolímeros degradables compuestos de ácido L-lactida, ácido D-láctico y carbonato de trimetileno. Estos polímeros se degradan in vivo por hidrólisis en alfa-hidroxiácidos que son metabolizados por el cuerpo.
- **Embalaje:** Están envasadas en un dispensador de plástico y se suministran como productos estériles de un solo uso.

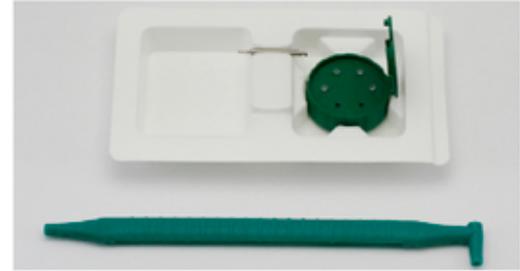

Set de chinchetas reabsorbibles:
caja, aplicador, fresa de inicio y 4 chinchetas

VENTAJAS:


- Rápido y fácil de usar
- Fácil de llegar al sitio quirúrgico eligiendo el extremo recto o en ángulo del aplicador de chinchetas para insertarla.
- Colocación de la chincheta reabsorbible inmediatamente después de perforar la membrana
- Disponen de un aplicador reutilizable



Aplicador de chinchetas.



Dispensador de plástico
con 4 chinchetas reabsorbibles.

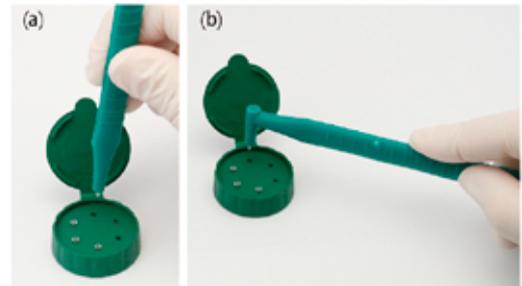

Carga de chinchetas Inion Tack por el extremo en ángulo (a)
o el extremo recto del aplicador (b).


Biocompatibilidad

- Biodegradables: no necesitan cirugía de remoción.
- Según las pruebas in vitro, las chinchetas Inion Tack conservan el 80% de la fijación a las 8 semanas y el 50% a las 16 semanas.
- Son biomateriales sintéticos y seguros.

Instrucciones de uso

Fijación de una membrana con Inion Tack

- 1.- Abra el dispensador con cuidado para evitar que se desprenda cualquier chincheta.
- 2.- Tome el aplicador de chinchetas y presiónelo firmemente sobre el cabezal de la chincheta. Cuando se escucha un chasquido, la chincheta está bien sujeta al aplicador (Fig.4).
- 3.- Sostenga la membrana de forma segura en la posición deseada y perforea directamente con la fresa incluida en el kit a través de la membrana, en el hueso.
- 4.- Mientras mantiene la membrana inmóvil, tome el aplicador de chinchetas cargado y presiónela firmemente contra el orificio realizado con la fresa. Cuando utilice el extremo en ángulo, aplique presión con los dedos en el cabezal del aplicador y no en el eje.
- 5.- Incline ligeramente el aplicador de chinchetas para soltarlo.

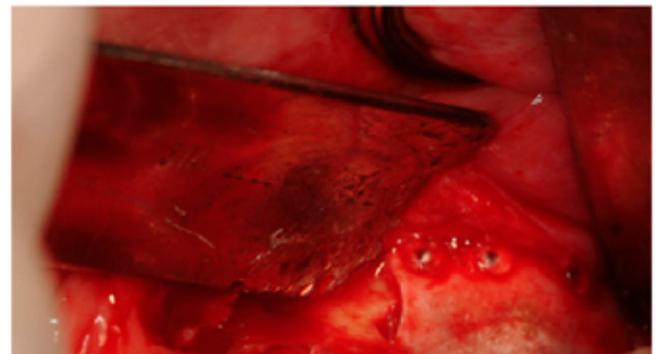

Aplicación de chinchetas biodegradables para fijar la
membrana biodegradable en una cirugía dental.