

MEMBRANES DE COL·LÀGEN



Membrana de Col·làgen

Mides disponibles :

23 x 23 x 0.25*mm ref. BB B-00223

20 x 30 x 0.25*mm ref. BB B-00223/4

20 x 40 x 0.25*mm ref. BB B-00223/5


Capsa de 2 unit.

PROPIETATS

- Col·làgen equí tipus I
- Totalment segur i biocompatible
- Fàcil d'aplicar
- Totalment absorbible de 6 a 8 setmanes

IDEAL PER EL SEU ÚS EN:

- Protecció de defectes ossis periimplantaris
- Tancament de petits estrips de la membrana sinusal
- Restauració de petites dehiscències ossies
- Protecció de l'alveol post-extractiu.
- Cobertura d'accés a l'os sinusal en procediments de elevació sinusal

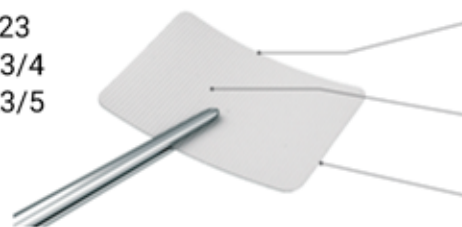

COSTAT LLIS

- contacte amb la mucosa

COSTAT RUGOS

- zona de millor adherència

GRUIX UNIFORME

- resistent i flexible, fàcil de modelar

INSTRUCCIONS D'ÚS:

1. La membrana es pot tallar i remodelar.
2. Rehidratar la membrana amb solució salina estèril a temperatura ambient durant uns quants minuts.
3. Si hi ha sangrat es possible aplicar el dispositiu sense hidratar-lo primer.
4. Aplicar la zona rugosa en contacte amb la zona a tractar en bones condicions de asepsia exercint una lleugera pressió.
5. Cobreixi amb la geniva superposada.



PRINCIPALS PRESTACIONS:

- Pot col·locar-se fàcilment en el lloc després de l'empelt ossi sense cap fixació.
- Proporciona una base perfecta per a la cicatrització de teixits durs i tous
- Crear un entorn favorable per a la regeneració òssia, que permet el creixement cel·lular osteogènic in situ.
- Evita la migració no desitjada de cèl·lules, també es pot utilitzar com un hemostàtic.
- Pot funcionar també com una barrera equilibrada amb un control de reabsorció evitant qualsevol reacció inflamatòria en els teixits tous.

CAS CLÍNIC

Pacient amb defecte ossi horitzontal i vertical, que necessita un implant retardat amb rehabilitació.

El llit de l'implant s'ha preparat amb l'ús d'un manual.

Ús de compactadores per evitar el dany de la paret òssia vestibular.



Obertura i despreniment de penjoll
El defecte ossi vertical és evident.
L'os és de el tipus D3-D4.



Preparació del llit de l'implant
amb l'ús de compactadors per
expansió i inserció d'un
implant.



Implant inserit amb un
evident defecte ossi horitzontal



El defecte ossi està ple d'empelt
heteròleg cobert amb una
membrana de col·lagen (T-Barrier)



Teixits tous després de la
curació completa.



Pròtesis final